



Hospital San Joan D'Alacant

Sección de Microbiología

Recogida de muestras para cultivo de Micobacterias en orina

Material necesario

Envase estéril de al menos 20 ml de capacidad, de boca ancha y cierre hermético

Técnica

- Deben mantenerse las normas generales correspondientes a la obtención de muestras para el cultivo.
- Recogida por micción estéril de la primera orina de la mañana.
- En cada micción se recoge toda la orina desechando en el WC sólo los primeros mililitros.
- Se deben enviar 3 muestras obtenidas en días consecutivos.

Conservación y transporte

- Igual que para cultivo de orina, cuando se recojan se pueden dejar en nevera hasta que se hayan obtenido las tres.

NO enviar la muestra en tubo con medio conservante, en este caso las muestras son rechazadas